

AIDE MÉMOIRE POUR LES ECHANTILLONS DE PATHOLOGIE/CYTOLOGIE

PREPRE-ANALYTIQUE		
REQUETE	EXIGENCE OBLIGATOIRE	
<p style="text-align: center;">DM-3111-pathology-requisition DM-5047-CYTOPATHOLOGIE (NON-GYNECOLOGIQUE) DM-5049-CYTOPATHOLOGIE (GYNECOLOGIQUE)</p> <p>* Renseignement clinique complet : Se référer au document FLT-OPTI-PATH-0008 concernant les codes de non-conformité PRÉ-PRÉ ANALYTIQUE DE PATHOLOGIE. En cas de non conformité, s'assurer d'utiliser le formulaire de résolution pour la non conformité. (FORM-01-APHI-DR-000940)</p>	<p>Identifier le spécimen : Nom, prénom ET DDM/RAMQ sur la réquisition et le contenant (Identifier le site du spécimen). Information du médecin obligatoire sur les requêtes soit le nom et prénom du médecin, numéro de permis et adresse de la clinique. Déposer la requête et le spécimen dans un sac BIO HASARD. <i>Déposer la réquisition dans la pochette du sac bio hasard, . - S'assurer que le couvercle du pot est bien fermé. Envoyer avec un matériau absorbant.</i></p>	
DIRECTIVE À SUIVRE Pathologie		
<p>Durant les heures ouvrables, contactez le laboratoire de pathologie du GLEN - 514-934-1934 Poste 37860/45564 (08h AM à 17h PM) Il est obligatoire de faire signaler le pathologiste de garde après 18h et le week-end pour tous les états frais ou échantillons STAT.</p>		
TYPE DE DEMANDE	CONTENANT	CONSERVATION/ACTION
<p>RUSH PATHOLOGIE À L'ÉTAT FRAIS <i>*Pour nos clients externes le service de coupes extemporanées est disponible pour Lachine et Lasalle seulement.</i></p>	<p style="text-align: center;">Coupe extemporanées et tissus frais pour le protocole de lymphome</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>*Aviser le département de pathologie du site Glen qu'une chirurgie ayant possiblement recouru au service de coupe extemporanée a été planifié en spécifiant la date et l'heure de la chirurgie. L'appel doit obligatoirement être fait au 514 934-1934 poste 37860. *Appeler le service de Taxi. Un 1ier appel peut-être fait 24 heures avant la chirurgie. Un appel doit être fait au moment de la chirurgie pour s'assurer que le taxi soit disponible au moment où l'échantillon sera prêt pour l'envoi. * Le spécimen doit être placé dans un contenant avec 2 identifiants et doit être placé dans un sac biohasard avec sa requête dûment remplie. Le spécimen doit être frais. (spécimen envoyé dans un 4x4 imbibé de saline) Les excisions doivent être envoyées dans une petite quantité de solution saline. Les biopsies à l'aiguille (core) doivent être envoyées sur du papier filtre bien humidifié. Le spécimen doit être placé au frais dans la glacière (ne pas mettre le spécimen directement sur la glace). * Apporter rapidement au laboratoire de pathologie. * Horodater la requête. * Donner en main propre à un technologiste médical du laboratoire de pathologie selon l'horaire de service. À NOTER : LACHINE et LASALLE, vous référer au SOP-01-APHI-PC-000615</p>
<p>RUSH PATHOLOGIE À L'ÉTAT FRAIS</p>	<p style="text-align: center;">AMPUTATION</p>	<p style="text-align: center;">Double sac BIOHASARD ROUGE</p> <p>En tout temps, garder le spécimen réfrigéré entre 2 et 8 degrés</p>
<p>RUSH PATHOLOGIE</p>	<p>Biopsie rénale OU tout échantillons URGENT * Biopsie de rein à l'état frais à l'interne, Biopsie de rein en formaline pour l'externe.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Spécimen avec FORMOL. TEMPÉRATURE PIÈCE. S'assurer de faire parvenir et déposer les spécimens à la réception des échantillons de la pathologie soit au E04-1417. NE PAS DÉPOSER AU LABORATOIRE CENTRAL.</p>
<p>RUSH POUR IMMUNOFLUORESCENCE</p>	<p>Toute biopsie demandant des analyses pour immunofluorescence</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>La solution de Michels est utilisée pour transporter des échantillons en vue de leur examen dans le cadre d'études d'immunofluorescence. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un fixateur, les échantillons peuvent être conservés à température ambiante pendant cinq jours dans un milieu de transport avant traitement. S'ASSURER DE RESPECTER LA DATE D'EXPIRATION.</p>
<p>RUSH POUR MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE</p>	<p>Toute biopsie demandant des analyses pour la microscopie électronique</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>S'assurer que les biopsies ne dépassent pas 2 mm. Placez le flacon dans un sac BIOHASARD, ajoutez un matériau absorbant en cas de fuite. Tous les documents doivent être conservés séparément du flacon. Expédiez le contenant et appelez le laboratoire de microscopie électronique au 514-934-1934, poste 22838, ou envoyez un courriel à glenpathology.reception@muhc.mcgill.ca pour informer la microscopie électronique de l'arrivée de l'échantillon. En tout temps, garder le spécimen réfrigéré entre 2 et 8 degré. S'ASSURER DE RESPECTER LA DATE D'EXPIRATION.</p>

PLACENTA	PLACENTA FRAIS SI POSSIBLE		S'assurer que tous les informations cliniques soient présentes (Age gestationnel, parité, poids du bébé, APGAR et le NOM COMPLET DU MÉDECIN . Dans le cas de mise en formaline, s'assurer de respecter le ratio formol/specimen 1:20 et d'inscrire l'heure mis en formaline sur la requête.
Specimen Fixé	BIOPSIE OU TOUT ÉCHANTILLON		Spécimen avec FORMOL (s'assurer de respecter le ratio formol/specimen 1:20). TEMPERATURE PIECE. S'assurer de faire parvenir et déposer les specimens à la réception des échantillons soit au E04-1417 . NE PAS DÉPOSER AU LABORATOIRE CENTRAL..
Gros Specimen avec formol demandant une préparation	<p>GASTROINTESTINAL:Œsophage, estomac, segment, intestinaux, rectum, anastomose intestinal, pancreas, foie et rate.</p> <p>GENITO URINAIRE</p> <p>ENDOCRINOLOGIE: Rein, vessie, testicule, vessie+prostate et glande surrénale.</p> <p>GYNECOLOGIE: Gros ovaire, uterus, fibrome/léiomyome, bx cone cervical et tissu de résection vulvaire pour cancer.</p> <p>SEIN: CANCER DU SEIN: lumpectomie, radical / partiel / masectomie radical modifiée,masse,mammoplastie,tissu de reduction mammaire et gynécomastie.</p> <p>RESPIRATOIRE:Poumon(total=pneum onectomie, lobectomie, segmentectomie, résection en coin),thorax / paroi thoracique,masse mediastinale, tumeur du thymus.</p> <p>ORL ET ENDOCRINOLOGIE : Larynx,pharynx et grosse glande thyroïde.</p> <p>TISSUS MOUS ET OS: Cancer des os,masseretroperitoneales,sarcome, grosse tumeur des tissus mous.</p> <p>AUTRE: Gros lipome,Pannus abdominal et cancer d'ellipse cutanée > 10cm.</p>		<p>URGENT SEIN : Dans le cas de Cancer du sein, il faut acheminer le spécimen dans les plus bref délai (2 heures maximum)</p> <p>URGENT RESPIRATOIRE: On doit s'assurer que les poumons soient infiltré DANS les 6 heures apres le prélevement.</p>
Specimen à l'état frais CYTOLOGIE LIQUIDE NON-GYNECOLOGIQUE	<p>CSF (reçu souvent sans préservatif)</p> <p>Urine Lavage bronchique et BAL</p> <p>Tous les FNA (Thyroid, Sein,Parotid, Lymph node, etc...)</p> <p>Bile duct brushing Bronchial</p> <p>Brushing + EBUS</p> <p>Liquide d'épanchement (Pleural, Péritonéal et Péricardial)</p>		<p>S'assurer de faire parvenir et déposer les spécimens dans le réfrigérateur à la réception des échantillons de la pathologie soit au E04-1417. NE PAS DÉPOSER AU LABORATOIRE CENTRAL..</p> <p>NE PAS METTRE DE FORMOL</p> <p>Requête de cytologie seulement.</p>
Specimen à l'état frais CYTOLOGIE GYNECOLOGIQUE	LAME ET CONTENANT THINPREP		<p>NE PAS METTRE AU RÉFRIGERATEUR, TOUJOURS TEMPERATURE PIECE</p> <p>S'assurer de faire parvenir et déposer les spécimens à la réception des échantillons de la pathologie soit au E04-1417. NE PAS DÉPOSER AU LABORATOIRE CENTRAL. Requête de cytologie seulement.</p>