

# Conseils pour le prélèvement d'échantillons d'ITS


## Des résultats précis commencent avec le prélèvement

### Comprendre l'impact des produits contenant des carbomères

La collecte d'échantillons est une partie essentielle du parcours des tests de diagnostic.

Avec les échantillons urogénitaux utilisés pour les tests d'ITS, la présence de substances interférentes susceptibles d'avoir un impact sur les résultats du TAAN peut être assez courante, en particulier avec les progrès récents de la sensibilité des tests.

Lors du transfert des tests ITS sur les systèmes cobas® 6800/8800, des précautions doivent être prises avec certains produits potentiellement utilisés par les patientes ainsi qu'avec les produits utilisés dans le processus de prélèvement d'échantillons. Comme pour la collecte des analyses de cytologie PAP, les échantillons urogénitaux de patientes ayant utilisé des produits contenant des carbomères peuvent générer des résultats non valides ou faussement négatifs. De plus, les produits contenant des carbomères utilisés pour lubrifier un spéculum, y compris les lubrifiants vaginaux, les crèmes et les gels, peuvent interférer avec le test et ne doivent pas être utilisés pendant ou avant le prélèvement d'échantillons urogénitaux. Les produits suivants ont été examinés pour leur teneur en carbomère et l'effet sur les tests cobas® IST sur les systèmes cobas® 6800/8800 :

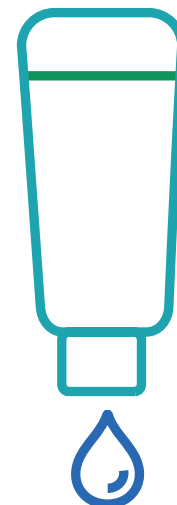

### Produits sans carbomère

### Produits contenant des carbomères

Lubrifiants*	
HR Lubricating Jelly	DynaLube Lubricating Jelly
KY Jelly	McKesson Lubricating Jelly
Surgilube Surgical Lubricating Jelly	Cardinal Health Lubricating Jelly
	Medline Lubricating Jelly
Hygiène Féminine*	
Conceptrol Contraceptive Gel	RepHresh Clean Balance
Labigam Anti-fungal	RepHresh Vaginal Gel Prefilled
Luvena Moisturizer	Vagisil Anti-itch Cream
Monistat 1	Vagisil Crème Regular Strength
Terrasil Ointment Plus Cleansing Bar	Vagisil ProHydrate
VCF Contraceptive Foam	Vagisil Sensitive Cream
Clotrimazole 3	IsoLove Balancing Gel
Clotrimazole Vaginal Cream	Replens Long-Lasting Vaginal Moisturizer
	Metronidazole Vaginal Gel

\* Cette liste représente un échantillon de lubrifiants et de produits d'hygiène féminine disponibles sur le marché mondial. Tous les produits disponibles n'ont pas été testés et examinés car ceux-ci changent souvent. Par conséquent, il est important de revoir les ingrédients des produits utilisés dans votre établissement.



#### Pour minimiser le risque de résultats de test invalides :

- S'abstenir d'utiliser des produits contenant des carbomères pour lubrifier un spéculum dans le cadre de la procédure de prélèvement, ou prélever un échantillon avant d'utiliser du lubrifiant/d'effectuer un examen pelvien.
- Demandez aux patientes de s'abstenir d'utiliser des produits d'hygiène féminine pendant environ 24 heures avant leur visite prévue.
- Si l'on sait que la patiente utilise des produits d'hygiène féminine au moment du prélèvement, un autre échantillon de type non vaginal peut être envisagé (par exemple, un échantillon d'urine).